

## Procedimiento de desmontaje de la incubadora para su limpieza

<b>Procedimiento</b>	<b>B24-7.1.3-PRC-008-V2</b>
<b>Servicio</b>	UNIDAD DE NEONATOS
<b>Fecha de entrega</b>	Octubre 2019
<b>Destinatario</b>	Personal de Enfermería U. Neonatos

Control de modificaciones		
Descripción	Nº de versión	Fecha de edición
Creación: <b>Inmaculada Escobar González, Leonor Torres Sáez, Ana M<sup>a</sup> López Alegre, Josefa López Pascual, M<sup>a</sup> José Cañada Ruiz, Olga Vázquez Fernández</b>	1	01/10/2010
Modificación: <b>Olga Vázquez Fernández, Josefa López Pascual, Laura Rodríguez-Barbero Requena</b>	2	Julio/2018

Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA

<b>Revisado:</b>	<b>David Baz Carmona</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Paloma Pérez Serrano</b>
<b>Fecha:</b>	<b>02/02/2019</b>	<b>Fecha:</b>	<b>21/10/2019</b>

### Índice del contenido

1	OBJETIVO.....	3
2	ALCANCE.....	3
3	DEFINICIONES.....	3
4	REALIZACIÓN.....	3
5	REGISTROS.....	4
6	DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.....	4
7	ANEXOS .....	5
8	CONTROL DE CAMBIOS.....	10

Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA

## 1 OBJETIVO

El servicio de neonatología presenta diversidad en cuanto a los recursos necesarios para la hospitalización del neonato.

En función del estado de salud del recién nacido, precisará de: cuna, cuna-térmica o incubadora; pudiendo variar a lo largo del periodo de ingreso según su evolución.

La necesidad de unificar modos de actuación para garantizar la calidad del cuidado, nos lleva a desarrollar un procedimiento de manejo de incubadora / cuna-térmica /cuna.

## 2 ALCANCE

Equipo de Enfermería de la Unidad de Neonatos.

## 3 DEFINICIONES

No procede

## 4 REALIZACIÓN

El procedimiento se realizará con buena iluminación. La incubadora se limpiará y desinfectará con cada cambio de paciente y/o al menos una vez a la semana, procediendo a su desmontaje de la siguiente manera:

1. Separar el enchufe de la red eléctrica.
2. Desconectar toma de oxígeno si fuera el caso.
3. Trasladar la incubadora al cuarto de sucio.
4. Elevar la canopia.

Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA

5. Separar la doble pared de los laterales de la incubadora.
6. Retirar el colchón.
7. Retirar el elemento intermedio y separar los distintos paneles (placa transparente, bandeja para radiografías, cuna rotatoria, bandeja deslizante, plataforma inclinable y bandeja).
8. Retirar el depósito de agua del soporte y la tapa del mismo.
9. Retirar todas las gomas, tanto de las cubiertas y puerta de acceso para tubos como de las ventanas laterales y la posterior de la canopia.

La incubadora ya está lista para que la compañera de la limpieza de la unidad proceda a la limpieza de la misma, una vez esté limpia procederemos a montar de nuevo todas las piezas.

## **5 REGISTROS**

No procede.

## **6 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL**

No procede.

Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA

## 7 ANEXOS

Para el desmontaje de los distintos paneles del elemento intermedio, las gomas, bandeja, etc., se adjuntan a este protocolo imágenes de cómo realizar el procedimiento.



Nos encontramos la incubadora de esta forma.




Levantamos la canopia e iremos desmontando pieza por pieza, según indica la fotografía.

Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA

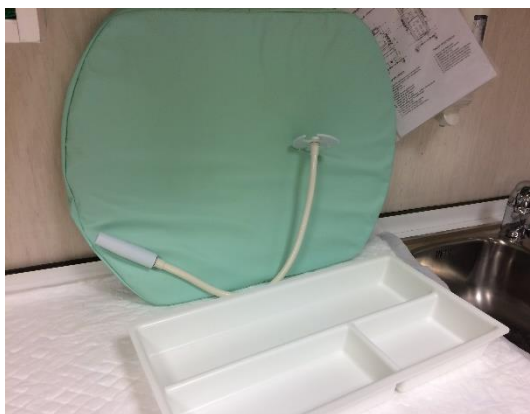

Colchón, percha y bandeja del cajón



Bandeja de RX



Base giratoria. Hacer click en la parte posterior para desmontar



Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA



No tenemos que tirar de esta pieza, sino empujar los soportes hasta escuchar un click.



Fijaos en los laterales, no hay que tirar sino presionar para desenganchar.



Así quedan las últimas piezas desmontadas del elemento intermedio.

Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA



Retiramos todas las gomas



La incubadora quedará así para su posterior limpieza.

Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA






Y por último retiramos el depósito del agua

Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA

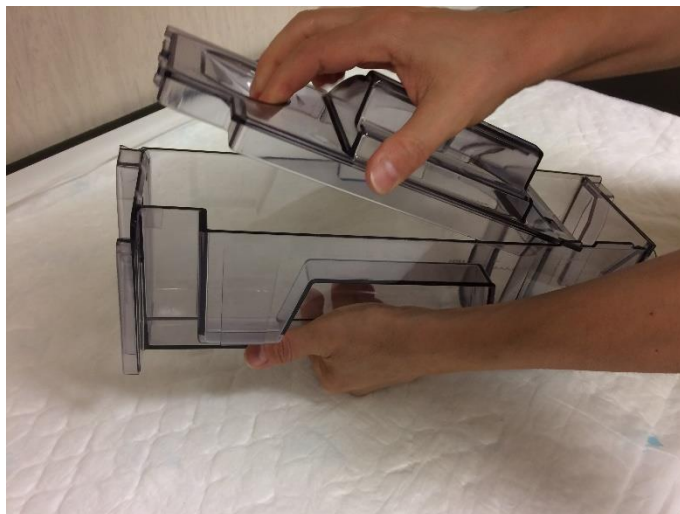

Para sacar la tapa tiramos hacia donde indica la flecha

**No tenemos que forzar ninguna pieza, todas entran perfectamente en su**

**posición adecuada.**

## 8 CONTROL DE CAMBIOS

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS				
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA 1ª ED.	FECHA ÚLTIMA ED.	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
PCE PT 055	1	01/10/2010		Elaboración inicial del documento
B24-7.1.3-PRC-008-V2	1		Julio 2018	Actualización del documento

Este documento es propiedad del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Queda prohibida su copia o reproducción, tanto total como parcial, sin el consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN: Toda copia NO CONTROLADA de este documento puede estar OBSOLETA